

RU

Руководство по эксплуатации

**Зонд аспирационный
«Юнона» Classic Combi,
зонд аспирационный
«Юнона» Profi Combi**

Описание.

Зонд состоит из гибкой полимерной трубки и переходника для присоединения шприца типа Луер на ее проксимальном конце. В трубке и переходнике размещен поршень, снабженный ручкой. Поршень установлен с возможностью осевого перемещения. Переходник снабжен стопором для предотвращения полного извлечения поршня из зонда и крышкой, закрывающей отверстие для присоединения шприца. Длина инструмента – 300 мм, диаметр трубки – 3,0 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки выполнены отверстия. В зонде аспирационном «Юнона» Classic Combi поршень выполнен из полимера, в зонде аспирационном «Юнона» Profi Combi – из стальной проволоки. Это обеспечивает различную жесткость инструментов и позволяет применять зонды аспирационные «Юнона» для забора материала из полости матки при нормальном («Юнона» Classic Combi) и при стенозированном («Юнона» Profi Combi) цервикальном канале.

Забор материала аспирационными зондами «Юнона» Classic и «Юнона» Profi происходит за счет разрежения, которое создается в трубке при извлечении из нее поршня до стопора. Дополнительный объем материала может быть получен шприцом, который присоединяется к переходнику шприца возможно введение в полость матки различных жидкостей (рентгенконтрастные вещества...).

Показания.

Забор материала для цитологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия.

Введение в полость матки растворов (рентгенконтрастные вещества...).

Противопоказания:

- беременность;
- анатомические особенности пациентки, препятствующие выполнению манипуляции;
- острый, подострый воспалительный процесс гениталий;
- обострение хронического воспалительного процесса гениталий.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента;
- недопустимо применение инструмента при нарушении упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке или этикетке.

Рекомендуемая методика применения.

Выполнение забора материала с помощью зондов аспирационных «Юнона» Classic Combi, «Юнона» Profi Combi производится с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом.

Подготовка к выполнению манипуляции.

- 1 Наружные половые органы, влагалище и шейку матки обработать раствором антисептика.
 - 2 Шейку матки обнажить в зеркалах, при необходимости фиксировать за переднюю или заднюю губу.
 - 3 Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
- В большинстве случаев дополнительное расширение цервикального канала и обезболивание не требуется.


Рекомендуемая техника забора материала из полости матки

- 1 Зонд аспирационный ввести через цервикальный канал в полость матки до контакта с ее дном (до упора).
- 2 Затем быстро и резко извлечь поршень из трубки до стопора. При этом в трубке создается разрежение, за счет которого происходит забор материала.



3 Для того, чтобы собрать большее количество материала, рекомендуется, вращая зонд выполнить несколько «скользящих» движений трубкой по передней, задней и боковым стенкам матки.

- 4 Дополнительный объем материала может быть получен при присоединении к зонду шприца типа Луер. Для этого, не извлекая зонд из полости матки, следует освободить от крышки отверстие переходника для присоединения шприца и присоединить его. После чего извлечь поршень шприца до упора. Дополнительный объем материала поступает в трубку зонда и шприц.
- 5 Извлечь зонд.

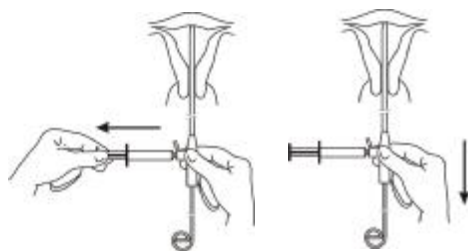

- 6 Собранный в трубке материал «выдавить» поршнем на предметное стекло или в транспортную емкость. При дополнительном заборе материала шприцом полученный материал «выдавить» поршнем шприца, а затем поршнем зонда.



- 7 Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

Рекомендуемая методика введения растворов в полость матки с помощью зондов аспирационных «Юнона» Classic Combi, «Юнона» Profi Combi.


Введение растворов в полость матки с помощью зондов аспирационных «Юнона» Classic Combi, «Юнона» Profi Combi производится с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом.

Подготовка к выполнению манипуляции.


- 1 Наружные половые органы, влагалище и шейку матки обработать раствором антисептика.
 - 2 Шейку матки обнажить в зеркалах, при необходимости фиксировать за переднюю или заднюю губу.
 - 3 Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
- В большинстве случаев дополнительное расширение цервикального канала и обезболивание не требуется.

Рекомендуемая техника выполнения манипуляции


- 1 Для введения растворов в полость матки к переходнику зонда необходимо присоединить шприц типа Луер. Для этого следует освободить от крышки отверстие переходника для присоединения шприца, после чего присоединить к переходнику предварительно заполненный шприц.

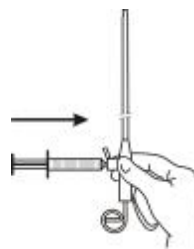

- 2 Зонд аспирационный с присоединенным шприцом ввести через цервикальный канал в полость матки.
- 3 Затем плавно извлечь поршень из трубки до стопора.

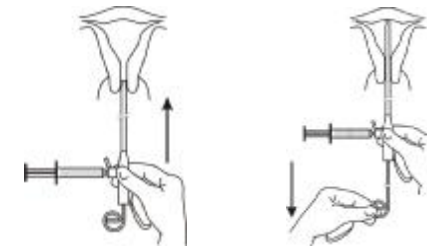

- 4 Ввести раствор в полость матки, выдавливая его поршнем шприца.
- 5 Извлечь зонд.

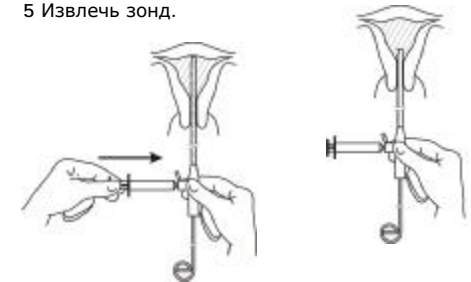

- 6 Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.



Изготовитель:
ЗАО "Медицинское предприятие Симург"
пр-т Людикова, 13-413, 210023, г. Витебск,
Республика Беларусь, www.simurg.by

ЗАО "Медицинское предприятие "Симург"
18-я линия В.О., д.31, оф.105, 199178,
Санкт-Петербург, Российская Федерация,
www.mp-simurg.ru

Упаковщик _____